

# Taptilo Kurzanlei- tung

© OHFA Tech, Inc.



# Selbstlernmodus

Lesen Sie vor der Verwendung  
das **Taptilo-Benutzerhandbuch**.



Download  
Benutzerhandbuch

## Themen\*

Punkte  
Alphabet  
Zahlen  
Wörter Level 1  
Wörter Level 2  
Wörter Level 3  
Symbole  
Musik (beta)

## Aktionen


Lesen  
Verfolgen & Schreiben  
Zuhören & Schreiben

## Schreibstile

Standard (Perkins)  
Tafel & Stift


\* Themen können je nach Sprache variieren.

Braille  
Tastenblöcke

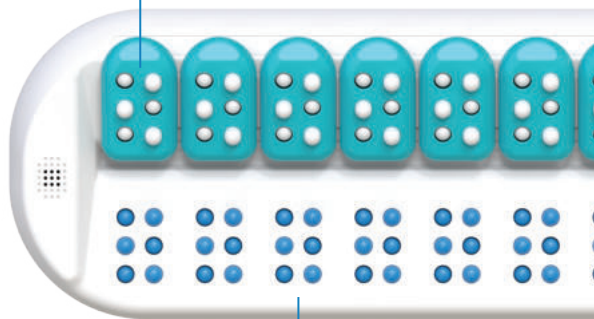

Braille Zeile

1. Drücken Sie den **Netzschalter**, um das Gerät zu starten. Stellen Sie sicher, dass es aufgeladen ist.
2. Lesen Sie Braille auf der **Braille Zeile** (unteres Feld).

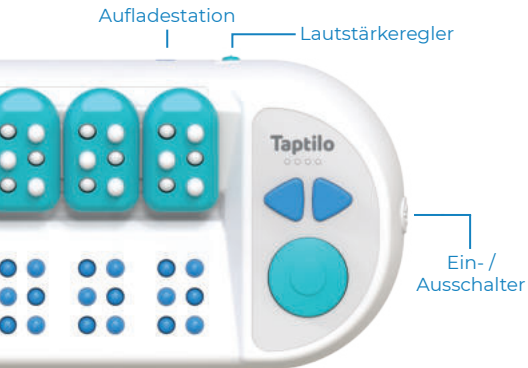

3. Nehmen Sie zum Schreiben einen der **Braille Tastenblöcke** und drücken Sie die Punkte auf und ab.
4. Plazieren Sie die Tastenblöcke wieder auf das obere Feld und drücken Sie die Kreistaste, **um die Antwort zu überprüfen**.
5. Um eine **neue Lektion auszuwählen**, drücken Sie den linken Pfeil und die Kreistaste zwei Sekunden lang gleichzeitig.

### Tipps

- Um das Wort **erneut** zu hören, drücken Sie die Kreistaste zwei Sekunden lang
- Um zwischen **Kurz- und Vollschrift** zu wechseln, drücken Sie zwei Sekunden lang gleichzeitig beide Pfeile
- Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zum **nächsten oder vorherigen** Wort zu gelangen.
- Um zu den **Einstellungen** zu gelangen, drücken Sie alle drei Tasten gleichzeitig 2 Sekunden lang






Download  
Taptilo App



## Verbinden mit der App

1. Laden Sie die Taptilo-App mit dem QR-Code herunter.
2. Öffnen Sie bei eingeschaltetem Taptilo die App und wählen Sie „Tippen, um Ihr Gerät anzuschließen“.
3. Wählen Sie im Popup Ihr Gerät aus. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
4. Um die Verbindungseinstellungen zu ändern, gehen Sie zu Optionen > Einstellungen.

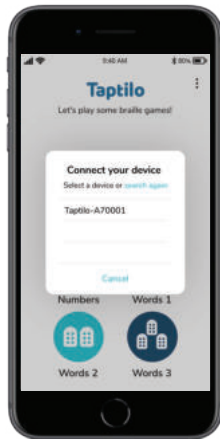

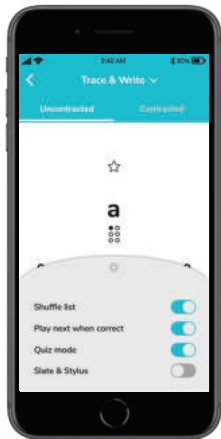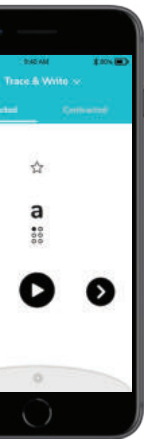

## Verwenden der App

1. **Wählen Sie ein Thema** aus dem Hauptmenü
2. **Tippen Sie auf ein Wort** aus der Liste. Taptilo wird es in Blindenschrift anzeigen
3. Verwenden Sie die **Tastenblöcke**, um die Antwort zu schreiben und drücken Sie die Kreistaste
4. Überprüfen Sie die **Antwort** in der App

## Funktionen

- Einfacher Wechsel zu Kurzschrift
- Quizmodus (kein Audio)
- Favoriten hinzufügen
- Tafel & Stift Schreibstil
- Übungserinnerung einstellen

Weitere Informationen finden Sie im **Taptilo-Benutzerhandbuch**.

## LIEFERUMFANG

- Taptilo-Gerät  
(enthält 9 Braille Tastenblöcke)
- 1 zusätzlicher Braille Tastenblock
- Adapter & Micro-USB-Kabel
- Minibeutel
- Taptilo Hülle
- Kurzanleitung

Download  
User Guide



## SUPPORT

**Website:** [www.brailletec.de](http://www.brailletec.de)

**Anschrift:** Tom-Mutters-Str. 11  
35041 Marburg  
Deutschland

**Email:** [brailletec@brailletec.de](mailto:brailletec@brailletec.de)

**Telefon:** +49 (0) 6421 802-0

Für technischen Support wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

## SICHERHEIT & HANDHABUNG

1. Gerät nicht unter 0°C oder über 50°C benutzen oder lagern.
2. Stellen Sie das Gerät oder Ladegerät nicht in die Nähe eines Heizkörpers oder einer Wärmequelle.
3. Halten Sie scharfe Metall- oder Magnetgegenstände vom Gerät fern.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät aufladen.
5. Stellen Sie keine Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes ab, um ein Verschütten zu verhindern. (Bei Verschütten das Gerät ausschalten, kopfüber stellen und vor dem Neustart 2-3 Tage an einem trockenen Ort lagern. Sofort den Kundendienst kontaktieren.)
6. Zerlegen Sie das Gerät nicht und verändern Sie keine Teile, einschließlich des Seriennummernetiketts.
7. Berühren Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen Händen.
8. Nichts Schweres auf das Gerät stellen bzw. Gerät nicht stark belasten."

\* Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen und Gefahren verursachen.

## PRODUKTGARANTIE

"Unsere Garantie deckt Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung ab, die bei normaler Verwendung von Taptilo auftreten können. Verbrauchsmaterialien wie Tastaturblöcke werden nicht abgedeckt. Mängel, die auf unsachgemäße Wartung, nicht autorisierte Reparaturen oder die Nichtbeachtung von Betriebsanweisungen zurückzuführen sind, sind nur einige der nicht abgedeckten Punkte. Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör und Teilen, einschließlich Ladegeräten, verursacht werden, die nicht von OHFA Tech hergestellt wurden, führen zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie. Ausführliche Informationen zu Ihrer eingeschränkten Garantie finden Sie unter [www.taptilo.com/warranty](http://www.taptilo.com/warranty).

Um Support zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder besuchen Sie [www.taptilo.com/support](http://www.taptilo.com/support).

Bitte bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf."